





การใช้งาน เครื่องเป่าอบแห้ง

การเปิด/ปิด

เปิดเครื่องตามขั้นตอน


- กดสวิตช์ **ON-OFF** ดังที่แสดงด้านล่าง
- เปิดสวิตช์เบรกเกอร์ให้อยู่ตำแหน่ง **ON**

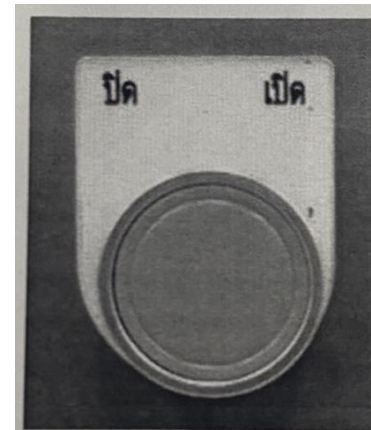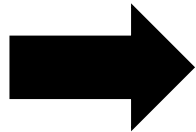

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

นำอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (เช่น Corrugated tubes)
เข้าตู้เป่าแห้ง แล้วปิดตู้ให้สนิท เพื่อทำการเป่าอบแห้ง

วิธีใส่ Corrugated tube เข้าเครื่องเป่าอบแห้ง

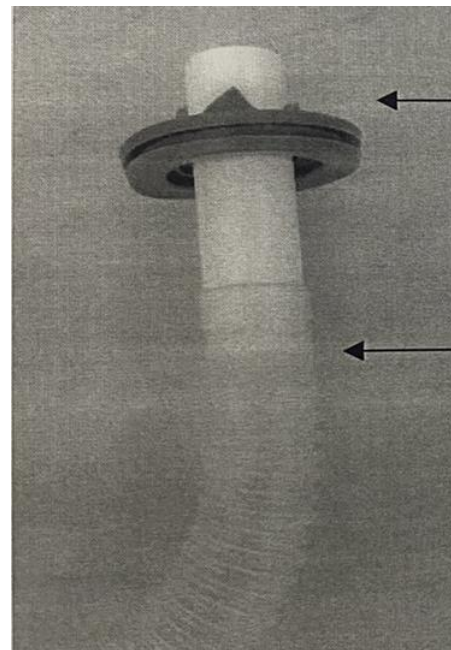

ลูกยางในเครื่องเป่าอบแห้ง

Corrugated tube



การปรับตั้งค่าอุณหภูมิ

ปรับตั้งค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 35-80 องศาเซลเซียส โดยใช้ปุ่มกด ดังนี้


1. กด  เพื่อปรับตั้งค่าอุณหภูมิ
2. กด  เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งตัวเลข
3. กด  หรือ  เพื่อปรับตัวเลขขึ้นลงตามอุณหภูมิที่ต้องการ
4. เมื่อปรับอุณหภูมิที่ต้องการเสร็จแล้ว กด  เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง



การปรับตั้งค่าเวลา

ปรับตั้งค่าเวลาอยู่ที่ 3-4 ชั่วโมง โดยใช้ปุ่มกด ดังนี้

1. กด  เพื่อปรับตั้งค่าเวลา
2. กด  เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งตัวเลข
3. กด  หรือ  เพื่อปรับตัวเลขขึ้นลงตามเวลาที่ต้องการ
4. เมื่อปรับเวลาที่ต้องการเสร็จแล้ว กด  เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

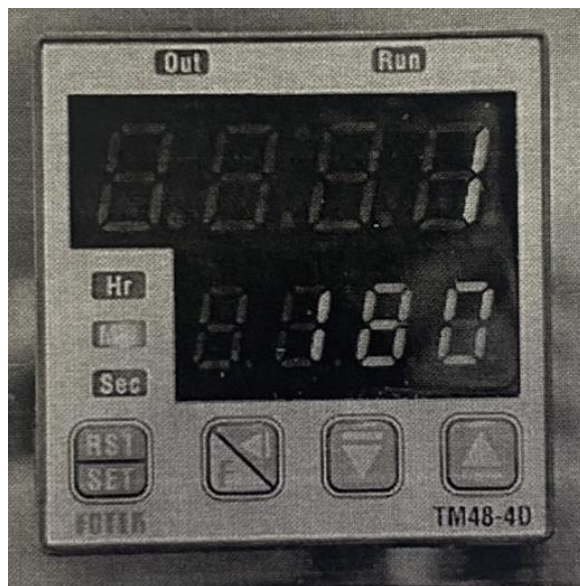

เครื่องจบการทำงาน

เมื่อเสร็จสิ้นรอบการทำงานของเครื่อง ไฟ
แสดงสถานะการทำงานจะปรากฏสีแดง และ
สามารถนำ **Corrugated tubes** หรือ
เครื่องมือทางการแพทย์ ออกจากตู้อบเป่าแห้ง
เพื่อนำไปเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อ

ผังวงจรไฟฟ้า

