

แบบฟอร์ม

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การใช้และการตรวจสอบ Incubator Transportation


ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	เสียบปลั๊กไฟเข้าที่ช่องรับไฟของตู้บดเด็กและแหล่งกระจายไฟที่ผนัง	
2	เมื่อต้องการเปิดเครื่องให้กดปุ่ม On บริเวณแผงควบคุม หลังจากปุ่มเครื่องจะ Alarm 1 ครั้ง และจะแสดงปริมาณแบตเตอรี่ รวมถึงอุณหภูมิตู้จะถูก Set อัตโนมัติไว้ที่ 36°C	
3	หากต้องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตู้กดปุ่ม Set temp เมื่อไฟติดจึงกดที่เครื่องหมาย เพื่อลดอุณหภูมิ และ ↑ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ	
4	วางทารกลงบนเบาะภายในตู้บดเด็ก ต่อ Skin Probe บริเวณด้านข้างของตู้บดและ ติด Skin Probe บริเวณท้องของทารกและปิดแผ่น cover ทับ	
5	เมื่อต้องการให้ออกซิเจนสามารถต่อ Flowmeter เข้ากับถังออกซิเจนบริเวณด้านข้างของตัวรถและต่ออุปกรณ์ที่ต้องการใช้ โดยการใช้ถังออกซิเจนมีข้อควรปฏิบัติดังนี้	
	5.1 เมื่อขึ้นรถ Refer ใช้ถังออกซิเจนจากถังใหญ่ภายในรถ Refer	
	5.2 ใช้ถังออกซิเจนถังเล็กเฉพาะเวลาที่เคลื่อนย้ายให้ใช้ถังออกซิเจนถังเล็กที่ติดตามกับรถ Incubator	
6	วิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่รถ Incubator	
	การตรวจสอบแบตเตอรี่ มีวิธีดังนี้	
	6.1 เสียบปลั๊กรถ Incubator Transportation (จะมีเสียง Alarm 1 ครั้ง)	
	6.2 กดปุ่ม Stand by	
	6.3 เมื่อครบ 3 ชม. แบตจะเต็ม 4 ชีต	
	6.4 ถอดปลั๊กจะมีเสียง Alarm 1 ครั้ง	
7	วิธีการตรวจออกซิเจนของรถ Incubator	
	7.1 ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนทั้ง 2 ถัง โดยถังออกซิเจนขนาดเล็กมีความจุ 2 คิว (1 คิว = 1000 ลิตร) เปิด 10 LPM ใช้เวลา 42 นาที จึงจะหมด	

ผู้บันทึก...นางสาวศศิวิมล หุตะว...ตำแหน่ง...พชทก วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี




หน่วยงาน...ศูนย์การแพทย์...วันที่ส่ง...10 มีนาคม 2566

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ทว.ชื่อ...อ.อริ...อ.อริ...อ.อริ...10 ก.ค. 66

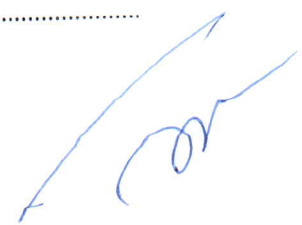

การใช้ Incubator transportation

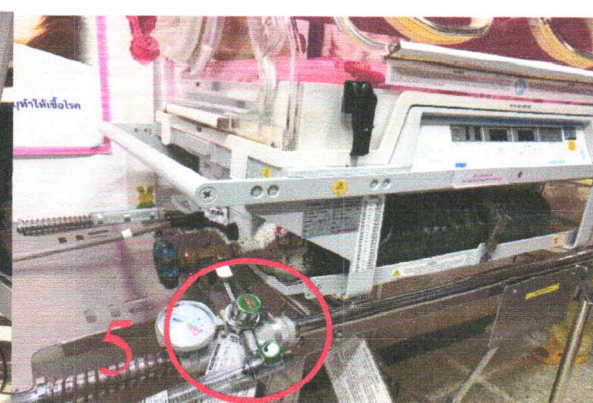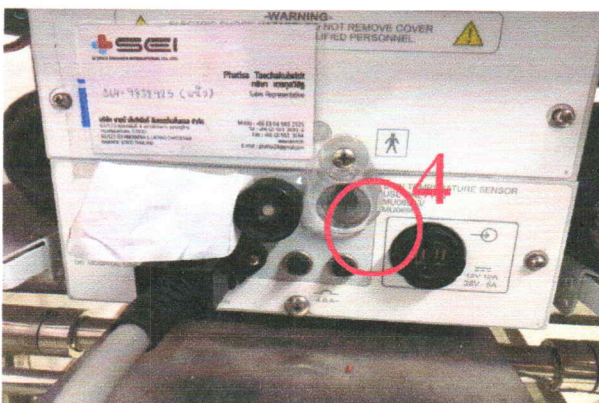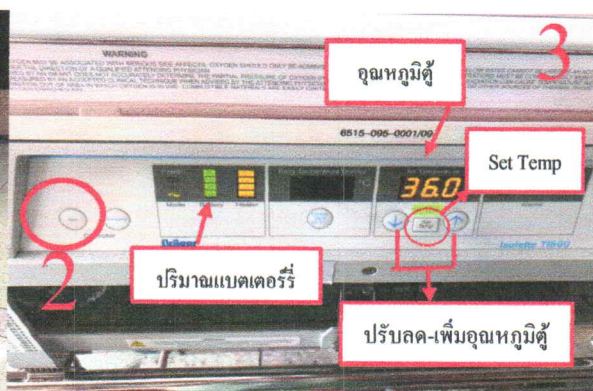

การตรวจสอบแบตเตอรี่และออกซิเจนของ Incubator transportation

