

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การใช้ central monitor

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	เปิด computer เข้าโปรแกรม ใส่ ID และ Password	
2.	กดปุ่ม Maternal information ใส่ชื่อจริง - นามสกุล , อายุ HN , ตามสมควร และกำหนดคลอด → กดปุ่ม OK	
3.	หาที่ต้องการปริ้นค่าใดค่าหนึ่งให้ตั้งค่ากราฟ หากต้องการกราฟ 1 นาที / 1 เซนติเมตร หรือ 1 นาที ต่อ 3 เซนติเมตร ให้กดสัญลักษณ์ Set up → Monitoring Setup → Paper speed → 1 cm / min หรือ 3 cm / min → กด OK	
4.	ออกจากหน้า Set up	
5.	กดปุ่ม CTG Review → เลือกช่วงของกราฟที่ต้องการปริ้นท์	
6.	กดปุ่ม Print → เลือกจำนวนเอกสาร / หน้าเอกสาร → กดปุ่ม OK	
	1	
	การตั้งค่าเครื่อง NST	
1.	เปิดเครื่อง	
2.	กดปุ่มสัญลักษณ์  → Print Speed เลือก 1 cm/min หรือ 3 cm/min → กด OK	
3.	กดปุ่มสัญลักษณ์  → ใส่ข้อมูล ชื่อจริง - นามสกุล , อายุ และ HN ของแม่ → กด OK	
4.	ติด Probe TOCO ที่ยอดมดลูก ท่อ Probe FHS	
5.	กดปุ่ม -0- (Autozero)	
6.	กดปุ่ม  Print	
	1	

ผู้บันทึก.....นางสาวศุภิสรา นุชทา

ตำแหน่ง.....นางสาววิภาชนิ ภูมิพิการ

หน่วยงาน.....สูติกรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ.....



วันที่

10 สค 66

