

## แบบฟอร์ม

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การเตรียมและใช้เครื่องอัลตราซาวด์

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	มีขั้นตอนดังนี้	
1	เตรียมเครื่องอัลตราซาวด์มาให้เพียงคนไข้	
2	จัดเตรียมเครื่องอัลตราซาวด์ไว้ทางด้านขวามือของหญิงตั้งครรภ์	
3	เสียบปลั๊กเครื่องอัลตราซาวด์	
4	กดปุ่มเปิด UPS	
5	กดปุ่มเปิดของเครื่องอัลตราซาวด์	
6	จัดทำของหญิงตั้งครรภ์โดยเปิดเสื้อบริเวณหน้าท้องโดยใช้ผ้า Swab ทับปิดบริเวณหัวหน้า	
7	เข้า New patient ใส่ HN แล้วกด OK	
8	เลือก Probe	
9	แพทย์ทำการอัลตราซาวด์	
10	หลังแพทย์ตรวจเสร็จให้กดปุ่ม End Exam	
11	เช็ดทำความสะอาดหน้าท้อง และตรวจสอบความเรียบร้อยของหญิงตั้งครรภ์	
12	เช็ดทำความสะอาด และความเรียบร้อยของ Probe และจัดเก็บ	
13	กดปุ่มปิดเครื่องอัลตราซาวด์	
14	กดปุ่มปิด UPS	
15	เสร็จแล้วให้ถอดปลั๊ก และเก็บให้เรียบร้อย	
16	นำเครื่องอัลตราซาวด์ ไปเก็บในห้อง อัลตราซาวด์ให้เรียบร้อย	

ผู้บันทึก.....นางสุปราณี.....สิงห์เวียง.....ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยเหลือคนไข้.....

หน่วยงาน

สูติกรรม

วันที่ส่ง

20 ก.ค. 66

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ.....

Sim 2105

วันที่

20 ก.ค. 66