

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การทำความสะอาด Laryngoscope

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	Laryngoscope blade	
1	นำ Blade ที่ใช้แล้วไปล้างเพื่อทำความสะอาดเอาคราบสกปรกและคราบเลือดออกก่อน	
2	ใช้แปรงขนนุ่มขัดให้ทั่ว Blade ด้วยน้ำ 4% Chlorhexidine scrub แล้วล้างด้วยน้ำประปาที่ไหลจากก๊อก	
	ให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง	
3	เช็ดด้วย 70% alcohol ทิ้งให้แห้ง	
4	เก็บใส่ถุงซิปล็อค หรือของพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว	
	<b>การทำความสะอาดด้ามจับ Laryngoscope ( Laryngoscope handle )</b>	
1	ให้ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน เช็ดด้ามจับด้วยผ้าปิดหมาดที่ผสมน้ำผงซักฟอก เช็ดตามด้วยน้ำสะอาด	
	แล้วเช็ดให้แห้ง	
2	เช็ดด้วย 70% alcohol เก็บใส่ถุงซิปล็อค หรือของพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว	
3	แล้วเก็บ Tray ที่สะอาด ปิดสนิท	
4	ถ้าไม่ได้ใช้ให้นำ Laryngoscope blade มาทำความสะอาด โดยเช็ดด้วย 70% alcohol อย่างน้อย 1 ครั้ง	
	ต่อเดือน และ เปลี่ยนถุงที่ใส่ Tray ทำความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอก และเช็ดให้แห้งทุกครั้งที่มีการใช้งาน หรือทุก 1 เดือน	
	<b>การทำความสะอาดกล่องเก็บ</b>	
1	ล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาด	
2	ทำให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งาน	
3	เช็ดด้วย 70% alcohol ก่อนใช้งาน	

ผู้บันทึก .น.ส อรพรรณ เกิดโพธิ์ .ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้.

หน่วยงาน.....หอผู้ป่วยหนัก...วันที่ 31 มกราคม 2566

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ..... วิลาวัณย์ กสิณแก้ว .....วันที่ 31 ม.ค 66