


การเตรียมเครื่องมือ ในขั้นตอนการอุดคลองรากฟัน (FRC)


แสงระวี บุญปราบ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

เครื่องตัด-ฉีดกักตุนเปอร์ชา

เครื่องตัด

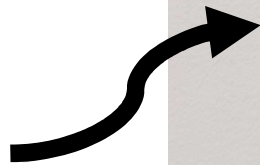


เครื่องฉีด

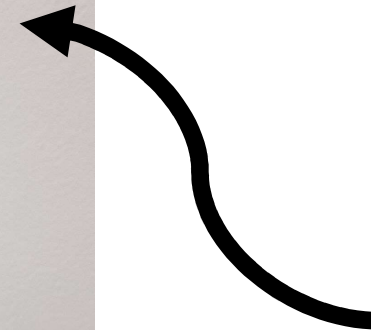


เครื่องตัด-ฉีดกัตตาเปอร์ชา

เครื่องตัด

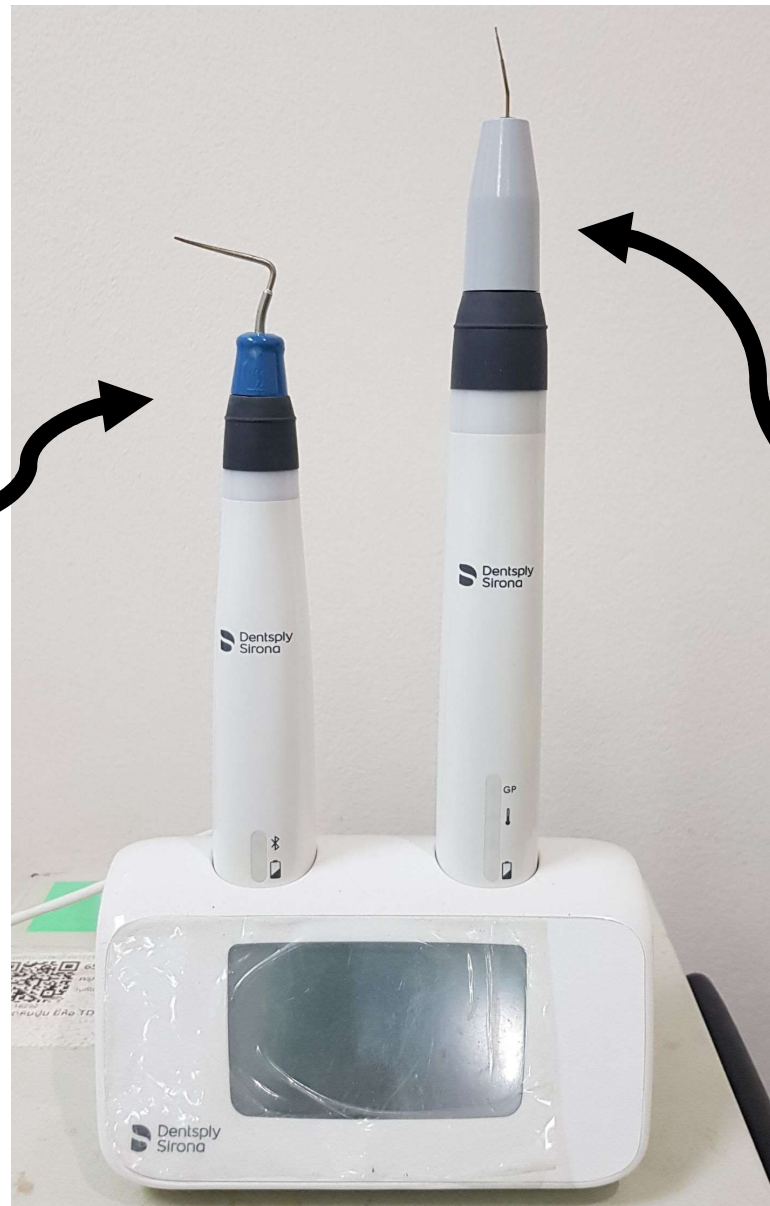

เครื่องฉีด

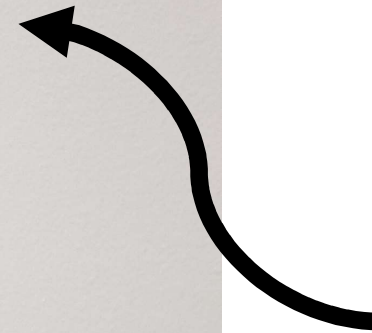

การเตรียมเครื่องตัด-ฉีกกัตตาเปอร์ซา



กดเปิดเครื่อง
เพื่อดูแบตเตอรี่



การเตรียมเครื่องตัดกัตาเปอร์ชา



ตัวเครื่องตัด



หัวตัด 3 ขนาด

การเตรียมเครื่องตัดกัตาเปอร์ชา



ประกอบเครื่อง และ Wrap พลาสติกบริเวณด้ามจับทั้งหมด

การเก็บเครื่องตัดกัตาเปอร์ชา



แกะ wrap พลาสติกออก
เช็ดตัวเครื่องด้วย caviwipe



เช็ดหัวตัดด้วยก๊อชแอลกอฮอล์
และ ใส่ซองซิล sterile

การเตรียมเครื่องฉีดกัตตาเปอร์ซา



ตัวเครื่องฉีด



เข็มฉีด 3 ขนาด
G20, 23 และ 25

การเปลี่ยนเข็มฉีดยา เครื่องฉีดกัตตาเปอร์ซา

- กดเปิดเครื่อง
- รอให้เครื่องร้อน
(ไฟสีขาวสว่างหยุดกระพริบ)



การเปลี่ยนเข็มฉีดยา เครื่องฉีดกัตตาเปอร์ซา

- กดเปิดเครื่อง
- รอให้เครื่องร้อน
(ไฟสีขาวสว่างหยุดกระพริบ)
- ดัดปลายเข็มฉีดยาให้ตรงโดยใช้ forcep
- ปิดหัวฉีดทวนเข็มนาฬิกา
- เช็ดส่วนตัวดันกัตตาเปอร์ซาด้วย
ก๊อชแอลกอฮอล์
- ใส่เข็มฉีดยาใหม่ลงในหัว
- หมุนหัวเข้ากับเครื่องฉีดตามเข็มนาฬิกา



การเปลี่ยนเข็มฉีดยา เครื่องฉีดกัตตาเปอร์ซา

- กดเปิดเครื่อง
- รอให้เครื่องร้อน
(ไฟสีขาวสว่างหยุดกระพริบ)
- ดัดปลายเข็มฉีดยาให้ตรงโดยใช้ forcep
- ปิดหัวฉีดทวนเข็มนาฬิกา
- เช็ดส่วนตัวดันกัตตาเปอร์ซาด้วย
ก๊อชแอลกอฮอล์
- ใส่เข็มฉีดยาใหม่ลงในหัว
- หมุนหัวเข้ากับเครื่องฉีดตามเข็มนาฬิกา



การเตรียมเครื่องฉีดกัตาเปอร์ชา



ประกอบเครื่อง และ Wrap พลาสติกบริเวณด้ามจับทั้งหมด



การเก็บ เครื่องมือทันตภาพอร์ชา

- แคะ wrap พลาสติกออก
- กดปิดเครื่อง
- เช็ดปลายเข็มด้วยก้อนแอลกอฮอล์
- เช็ดตัวเครื่องด้วย caviwipe

การเก็บเครื่องตัด-ฉีกกัตตาเปอร์ชา



นำไปชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้งหลังใช้งาน

การเก็บเครื่องตัด-ฉีดกัตตาเปอร์ชา



แบตเตอรี่ไฟสีเขียวจะหยุดนิ่ง