

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน ^{๑๒๖๗}
 เรื่อง การตรวจ Dengue NS1 Ag ในผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออก

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	เจาะเก็บเลือดส่งไปแยกจากหลอดเลือดดำ ปริมาณ 3 ml ใส่หลอดลงไนล้อน Heparin sodium	
2.	นำหลอดเลือดไปปั่นเป็นเวลา 5 นาที	
3.	บนทอนทอร์ไฮราแอสโตร AFR-CT 400 Analyzer	
4.	เปิดเครื่องและใส่ ID card ในเครื่อง AFR-CT 400 Analyzer	
5.	ถ่าย Serum/plasma 75 μl ลงใน Extraction buffer tube และในเข็ทักมีสีฟ้าเป็น Whole Blood 100 μl	
6.	แกะสลักหลอดบอดออกจากช่อง และตัดตัวอย่างที่สกัดแล้วลงในช่อง sample well 75 μl	
7.	นำตัวอย่างทดสอบเข้าเครื่องเพื่อทำการอ่านผลโดยนั้น ด้านที่มีบาร์โค้ดเข้าด้านในเครื่อง ใช้ mode Hatch เครื่องจะนับถอยหลัง 15 นาที และรายงานผล	
8.	รายงานผลในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล	
ผู้บันทึก นายอานนท์ แสงนง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยงาน ชั้นสุวิทย์ ๑ วันที่ 26 ธ.ค. 2566 ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง..... ลงชื่อ..... วันที่ 26/12/66		